



Wkręt kaniulowany (podskokowy)

- *IMPLANTY*
- *INSTRUMENTARIUM 40.6590.900*
- *TECHNIKA OPERACYJNA*



OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Tytan lub stop tytanu



Średnica



Samogwintujący



Ostrzeżenie - zwróć uwagę na szczególne postępowanie.



Czynność wykonać pod kontrolą aparatu RTG.



Informacja o kolejnych etapach postępowania.



Przejdźcie do kolejnego etapu postępowania.



Powrót do określonego etapu i powtórzenie czynności.



Przed zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje stosowania. Zawiera ona m.in. wskazania, przeciwwskazania, skutki niepożądane oraz zalecenia i ostrzeżenia związane z użyciem wyrobu.



Opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

www.chm.eu

Nr dokumentu ST/102

Data wydania 22.03.2021

Data przeglądu P-001-22.03.2021

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.
Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie internetowej: ifu.chm.eu

I. WSTĘP	5
II. IMPLANTY	6
II.1. WKREŚT KANIULOWANY (PODSKOKOWY)	6
III. INSTRUMENTARIUM	7
IV. TECHNIKA OPERACYJNA	8
IV.1. DOSTĘP OPERACYJNY	8
IV.2. WPROWADZENIE IMPLANTU	8
IV.3. USUNIĘCIE IMPLANTU	9

I. WSTĘP

Wkręt kaniulowany (*podskokowy*) jest wyrobem jednoelementowym, ma zastosowanie w leczeniu stopy płasko - koślawej (*plaskostopia*) u dzieci i młodzieży.


Wskazania do stosowania:

- stopa płasko - koślawą utrwaloną
- stopa płasko - koślawą przykurczoną
- stopa płasko - koślawą statyczną ze skróceniem ścięgna Achillesa

Przedstawiony asortyment implantów wykonany jest z materiałów zgodnych z wymaganiami norm serii ISO 5832. Gwarancją wysokiej klasy wykonania implantów jest spełnienie wymogów norm systemu zarządzania jakością oraz wymogów Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG.

II. IMPLANTY


II.1. WKRĘT KANIULOWANY (PODSKOKOWY)

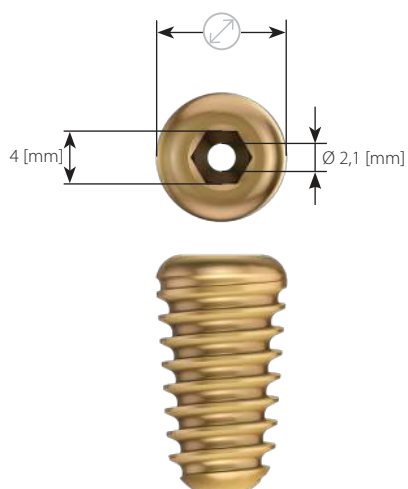

				kolory
8			3.1739.008	
9			3.1739.009	
10			3.1739.010	
11			3.1739.011	
12			3.1739.012	
13			3.1739.013	
14			3.1739.014	

III. INSTRUMENTARIUM

Do przeprowadzenia implantacji wkręta podskokowego oraz usunięcia implantu po zakończonym okresie leczenia służy instrumentarium **[40.6590.000]**. Narzędzia wchodzące w skład instrumentarium są ułożone na statywie i przykryte pokrywą, przez to ułatwione jest ich przechowywanie oraz transport na blok operacyjny.

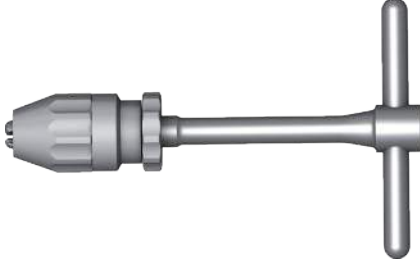Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych (podskokowych) 40.6590.900	Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
	Drut prowadzący 2,0/380	40.6597.380	2
	Przymiar 8	40.6574.080	1
	Przymiar 9	40.6574.090	1
	Przymiar 10	40.6574.100	1
	Przymiar 11	40.6574.110	1
	Przymiar 12	40.6574.120	1
	Przymiar 13	40.6574.130	1
	Przymiar 14	40.6574.140	1
	Śrubokręt S4	40.6591.000	1
	Rączka Steinmanna	40.0987.200	1

Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych (podskokowych) 40.6590.900	Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara	12.0750.200	1
	Statyw	40.6599.900	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	12.0750.100	1

IV. TECHNIKA OPERACYJNA



IV.1. DOSTĘP OPERACYJNY

- 1 Cięcie skórne 1-3 cm po stronie bocznej stopy w rejonie zatoki stępu.





IV.2. WPROWADZENIE IMPLANTU

- 2 W zatokę stępu wprowadzić drut prowadzący [40.6597.380] za pomocą rączki Steinmanna [40.0987.200]. Krawędź drutu powinna być wyczuwalna po przyśrodkowej stronie stawu piętowo – skokowego z lekkim wybrzuszeniem skóry.

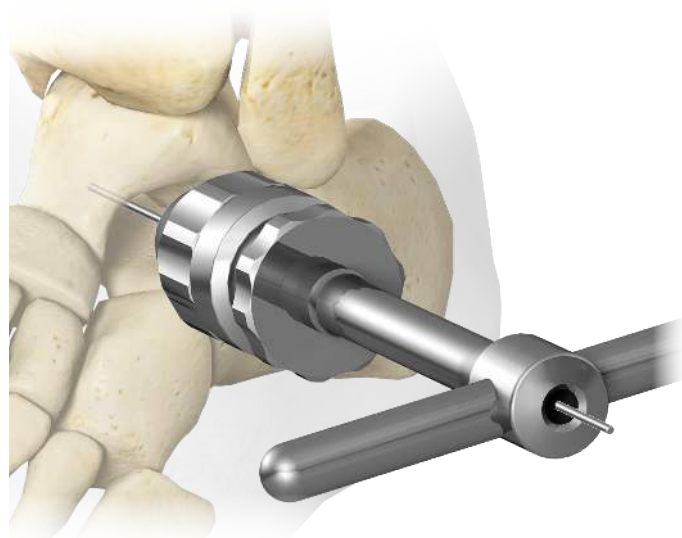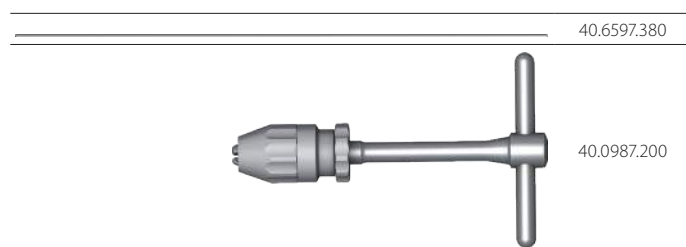


- 3 Po drucie prowadzącym 2,0/380 [40.6597.380] wprowadzać kolejno przymiary do uzyskania prawidłowego ustawienia kości piętowej w przybliżeniu 2° ÷ 4° od pozycji neutralnej. Wielkość ostatniego przymiaru wskazuje na rozmiar implantu.

Usunąć przymiar, drut prowadzący zostawić.

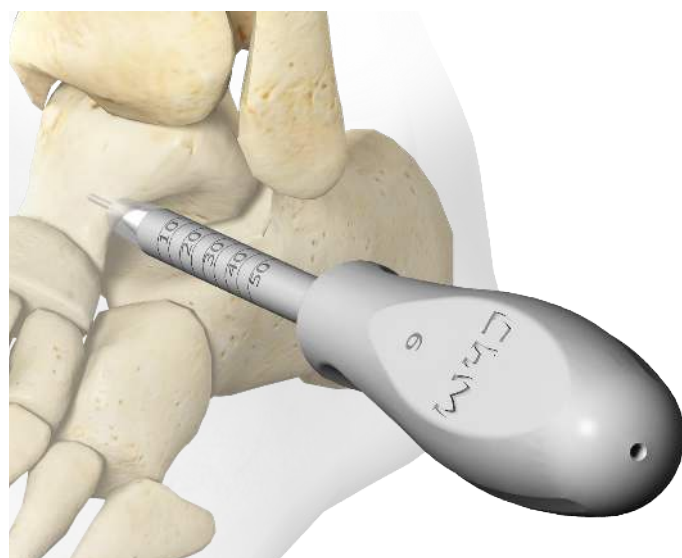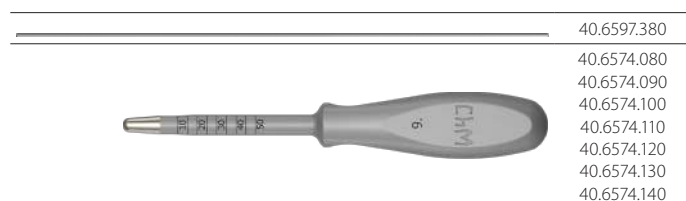

- 4 Dobrany implant nałożyć na grot śrubokrętu S4 [40.6591] i wprowadzić po drucie prowadzącym 2,0/380 [40.6597.380] do zatoki stępu.

Usunąć śrubokręt oraz drut prowadzący.

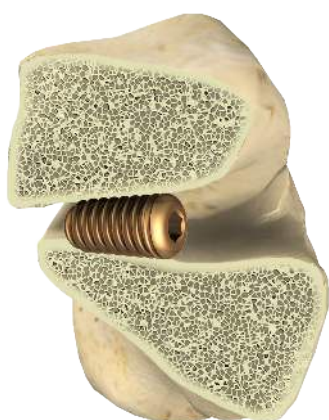


IV.3. USUNIĘCIE IMPLANTU

- 5 W zatokę stępu wprowadzić drut prowadzący 2,0/380 [40.6597.380]. Po drucie prowadzącym wprowadzić grot śrubokrętu S4 [40.6591] w gniazdo wkręta podskokowego. Pokręcając śrubokrętem w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara usunąć implant z zatoki stępu.




wprowadzenie drutu

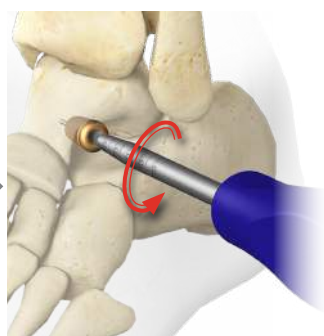

wykręcenie implantu



usunięcie implantu

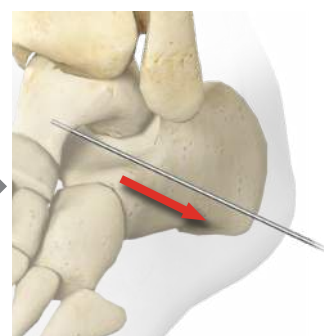

usunięcie drutu

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu



CE 0197