



Винт канюлированный (подтаранный)

- ИМПЛАНТАТЫ
- ИНСТРУМЕНТЫ 40.6590.900
- ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Титан или сплав титана



Диаметр



Самопорежающий



Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру.



Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата.



Информация о следующих этапах процедуры.



Переход к следующему этапу процедуры.



Возврат к определенному этапу и повторение действия.



Перед применением изделия следует внимательно прочитать инструкцию по применению. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные с применением изделия.



Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

www.chm.eu

Номер документа ST/102

Дата выпуска 22.03.2021

Дата обновления P-001-22.03.2021

Производитель оставляет за собой право вносить конструкторские изменения.
Актуализированные ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ находятся на веб-сайте: ifu.chm.eu

I. ВВЕДЕНИЕ	5
II. ИМПЛАНТАТЫ	6
II.1. ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ (ПОДТАРАННЫЙ)	6
III. ИНСТРУМЕНТЫ	7
IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	9
IV.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП	9
IV.2. ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА	9
IV.3. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА	10

I. ВВЕДЕНИЕ

Винт канюлированный (*подтаранный*) является одноэлементным изделием, применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (*плоскостопия*) у детей и подростков.


Показания к применению:








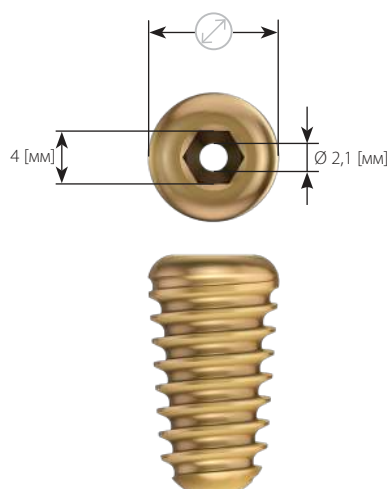


- выраженная плоско-вальгусная стопа
- контрактурная плоско-вальгусная стопа
- статическая плоско-вальгусная стопа с укорочением ахиллова сухожилия

Представленный ассортимент имплантатов, изготовленный из материалов, соответствующих требованиям стандарта ISO 5832. Гарантией высокого качества имплантатов является выполнение требований стандартов системы управления качеством, а также требований Директивы 93/42/ЕЕС по медицинским изделиям.

II. ИМПЛАНТАТЫ

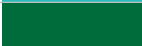








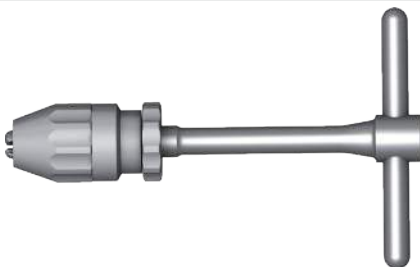
II.1. ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ (ПОДТАРАННЫЙ)



			цвета
8		3.1739.008	
9		3.1739.009	
10		3.1739.010	
11		3.1739.011	
12		3.1739.012	
13		3.1739.013	
14		3.1739.014	

III. ИНСТРУМЕНТЫ

Для проведения имплантации винта подтаранного, а также его удаления после окончания периода лечения предназначен набор инструментов [40.6590.000]. Инструменты, входящие в состав набора, расположенные в стерилизационных контейнерах, благодаря чему облегчается их хранение и транспортировка в операционную.

Инструменты д/канюлированных (подтаранных) винтов 40.6590.900	Название	№ по кат.	Шт.
	Спица-направитель 2,0/380	40.6597.380	2
	Мера 8	40.6574.080	1
	Мера 9	40.6574.090	1
	Мера 10	40.6574.100	1
	Мера 11	40.6574.110	1
	Мера 12	40.6574.120	1
	Мера 13	40.6574.130	1
	Мера 14	40.6574.140	1
	Отвертка S4	40.6591.000	1
	Ручка Штейнманна	40.0987.200	1

Инструменты д/канюлированных (подтаранных) винтов 40.6590.900	Название	№ по кат.	Шт.
	Покрышка алюминиевая перфорированная 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Подставка	40.6599.900	1
	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА



IV.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

- 1 Кожный разрез 1-3 см по боковой поверхности стопы в области заплюсневой пазухи.



IV.2. ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА

- 2 Ввести в заплюсневую пазуху спицу-направитель [40.6597.380] при помощи ручки Штейнманна [40.0987.200]. Острые спицы должны быть ощутимым с медиальной стороны таранно-пяточного сустава в виде небольшой выпуклости на коже.

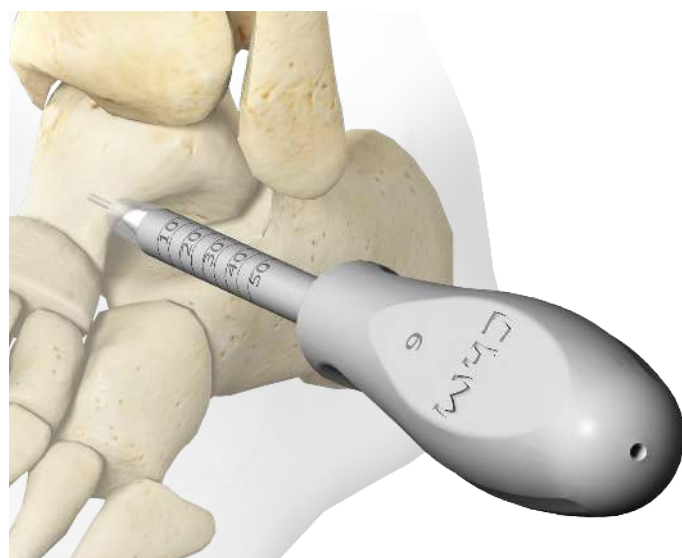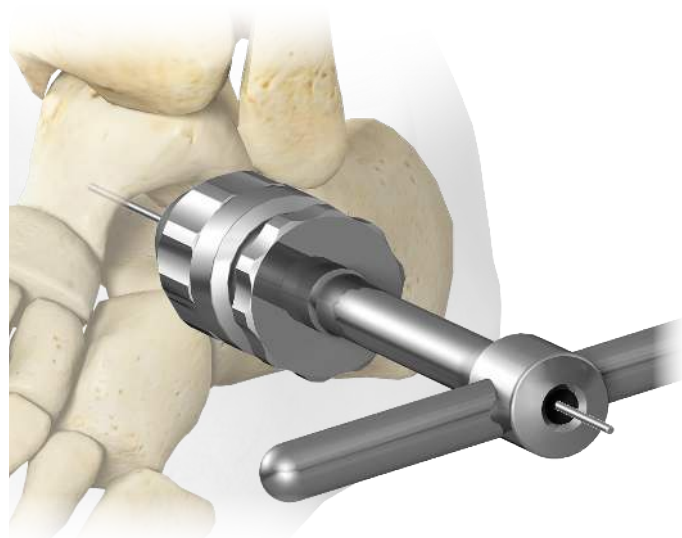

- 3 По спице-направителю 2,0/380 [40.6597.380] по очереди вводить меры до достижения правильного положения пяточной кости, приблизительно $2^{\circ} \div 4^{\circ}$ от нейтрального положения. Размер меры соответствует размеру имплантата.


Удалить меру, оставить спицу-направитель.

	40.6597.380
	40.6574.080
	40.6574.090
	40.6574.100
	40.6574.110
	40.6574.120
	40.6574.130
	40.6574.140




- 4** Подобранный имплантат насадить на наконечник отвертки S4 [40.6591] и ввести по спице-направителю 2,0/380 [40.6597.380] в заплюсневую пазуху.

Удалить отвертку и спицу-направитель.

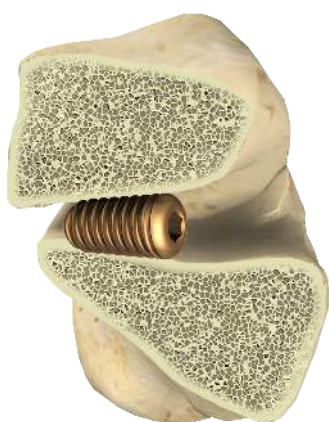


IV.3. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА


- 5** Ввести спицу-направитель [40.6597.380] в заплюсневую пазуху. По спице-направителю ввести наконечник отвертки S4 [40.6591] в шлиц подтаранного винта. Крутя отверткой против часовой стрелки, удалить имплантат из заплюсневой пазухи.

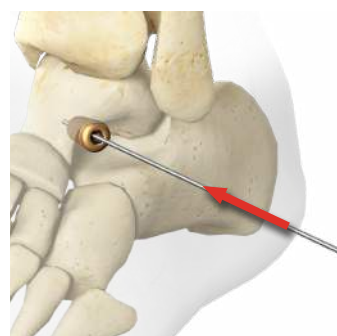


введение спицы-направителя

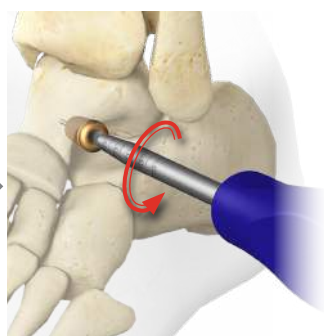

выкручивание имплантата

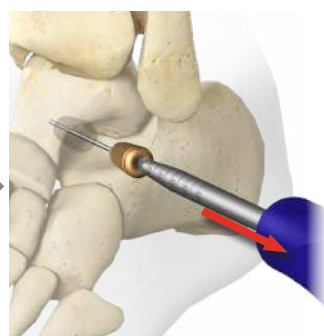

удаление имплантата

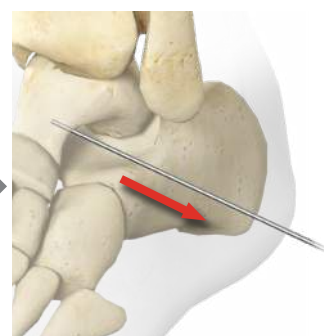

удаление спицы-направителя

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu



CE 0197