



Винт канюлированный (подтаранный)

- ИМПЛАНТАТЫ
- ИНСТРУМЕНТЫ 40.6590.000
- ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Титан или сплав титана



Диаметр



Самопорежающий



Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру.



Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата.



Информация о следующих этапах процедуры.



Переход к следующему этапу процедуры.



Возврат к определенному этапу и повторение действия.



Перед применением изделия следует внимательно прочитать инструкцию по применению. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные с применением изделия.



Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

www.chm.eu

Номер документа ST/64A

Дата выпуска 07.07.2015

Дата обновления P-004-27.11.2020

Производитель оставляет за собой право вносить конструкторские изменения.
Актуализированные ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ находятся на веб-сайте: ifu.chm.eu

I. ВВЕДЕНИЕ	5
II. ИМПЛАНТАТЫ	6
III. ИНСТРУМЕНТЫ	7
IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА	8
IV.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП	8
IV.2. ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА	8
IV.3. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА	9

I. ВВЕДЕНИЕ

Винт канюлированный (*подтаранный*) является одноэлементным изделием, применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (*плоскостопия*) у детей и подростков.



Показания к применению:



- выраженная плоско-вальгусная стопа
- контрактурная плоско-вальгусная стопа
- статическая плоско-вальгусная стопа с укорочением ахиллова сухожилия

Представленный ассортимент имплантатов, изготовленный из материалов, соответствующих требованиям стандарта ISO 5832. Гарантией высокого качества имплантатов является выполнение требований стандартов системы управления качеством, а также требований Директивы 93/42/ЕЕС по медицинским изделиям.

II. ИМПЛАНТАТЫ

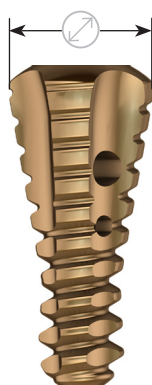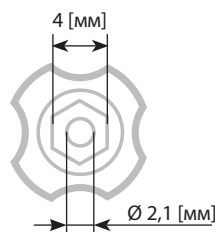






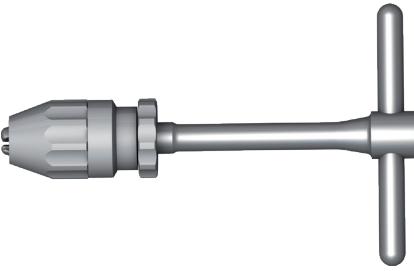

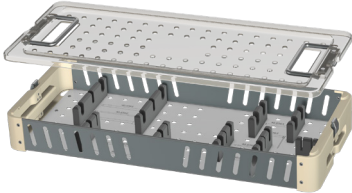

II.1. ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ (ПОДТАРАННЫЙ)



	
8	Ti
9	
10	
11	
12	

III. ИНСТРУМЕНТЫ

Для проведения имплантации винта подтаранного, а также его удаления после окончания периода лечения предназначен набор инструментов [40.6590.000]. Инструменты, входящие в состав набора, расположенные в стерилизационных контейнерах, благодаря чему облегчается их хранение и транспортировка в операционную.

Инструменты для канюлированных (подтаранных) винтов 40.6590.000		Название	№ по кат.	Шт.
		Спица-направитель 2,0/380	40.6597.380	2
		Мера 8	40.6592.000	1
		Мера 9	40.6593.000	1
		Мера 10	40.6594.000	1
		Мера 11	40.6595.000	1
		Мера 12	40.6596.000	1
		Отвертка S4	40.6591.000	1
		Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
		Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
		Подставка	40.6599.000	1
		Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА



IV.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

- 1 Кожный разрез 1-3 см по боковой поверхности стопы в области заплюсневой пазухи.



IV.2. ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА

- 2 Ввести в заплюсневую пазуху спицу-направитель [40.6597.380] при помощи ручки Штейнманна [40.0987.200]. Острые спицы должны быть ощутимым с медиальной стороны таранно-пяточного сустава в виде небольшой выпуклости на коже.

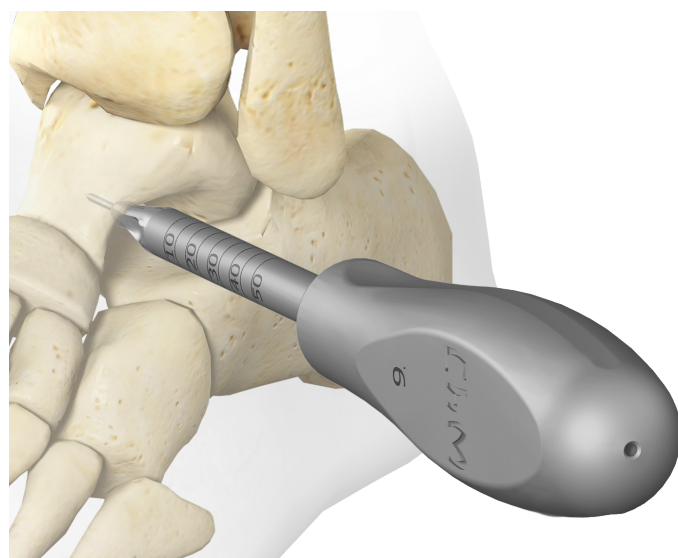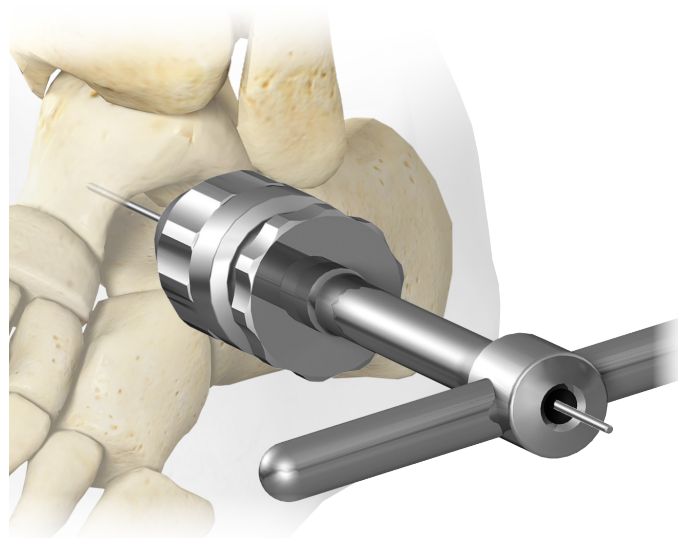

- 3 По спице-направителю 2,0/380 [40.6597.380] по очереди вводить меры до достижения правильного положения пяточной кости, приблизительно $2^{\circ} \div 4^{\circ}$ от нейтрального положения. Размер меры соответствует размеру имплантата.




Удалить меру, оставить спицу-направитель.

	40.6597.380
	40.6592.000
	40.6593.000
	40.6594.000
	40.6595.000
	40.6596.000





- 4** Подобранный имплантат насадить на наконечник отвертки S4 [40.6591] и ввести по спице-направителю 2,0/380 [40.6597.380] в заплюсневую пазуху.

Удалить отвертку и спицу-направитель.

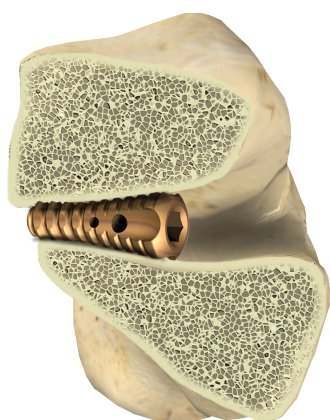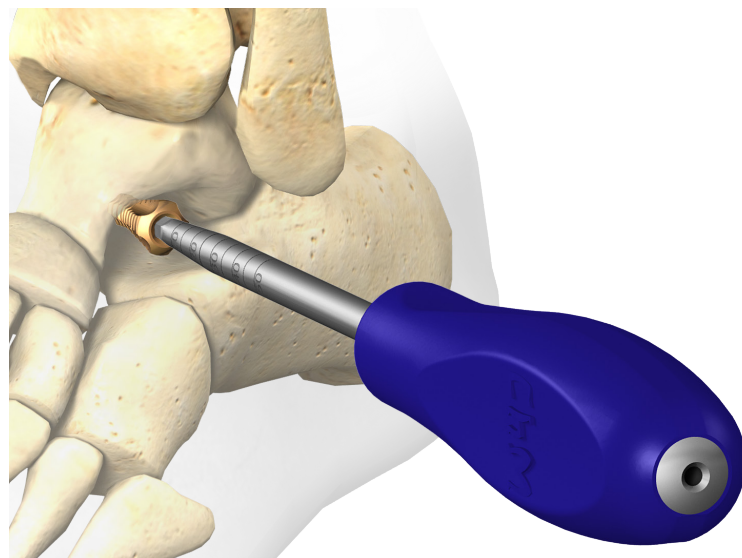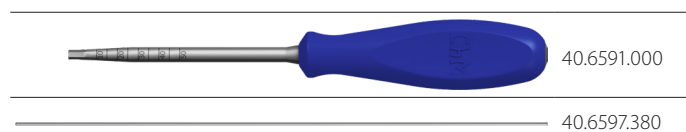


IV.3. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА


- 5** Ввести спицу-направитель [40.6597.380] в заплюсневую пазуху. По спице-направителю ввести наконечник отвертки S4 [40.6591] в шлиц подтаранного винта. Крутя отверткой против часовой стрелки, удалить имплантат из заплюсневой пазухи.

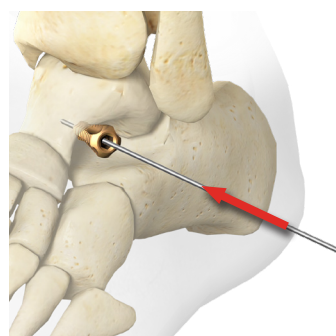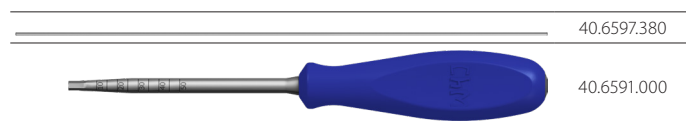


введение спицы-направителя

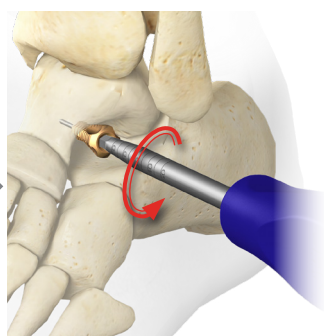

выкручивание имплантата

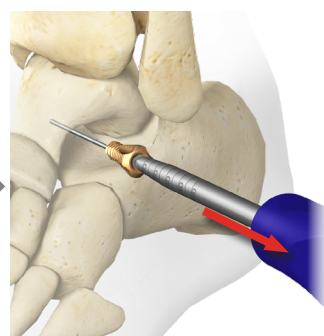

удаление имплантата

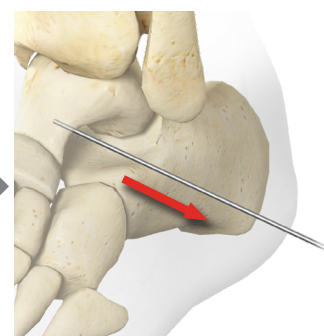

удаление спицы-направителя

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu



CE 0197