



STATYW PRZEWOŹNY DO ZASILACZY
nr kat. 30.0040



Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:



ChM sp. z o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Polska
tel. +48 85 713-13-30÷38, fax: +48 85 713-13-39
www.chm.eu e-mail: chm@chm.eu

Nr dokumentu	ST/509
Data wydania	15.05.2017
Data przeglądu	P-001-15.05.2017

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.

1. PRZEZNACZENIE	4
2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE	5
3. MONTAŻ ZASILACZA I OBSŁUGA STATYWU	6
4. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA	7
5. SERWIS	7

1. PRZEZNACZENIE

Statyw służy jako mobilna platforma dla rodziny zasilaczy opasek zaciskowych firmy **ChM** oraz wyposażenia niezbędnego do pracy z urządzeniem jak opaski, wyściółki, przewody zasilające i innego rodzaju akcesoria.


Urządzenia kompatybilne ze statywem

	nazwa urządzenia	Nr kat.
	Pojedynczy elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-01	30.0025.000
	Podwójny elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-02	30.0026.000
	Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych	30.0020.300
	Podwójny zasilacz regulowany opasek zaciskowych	30.0021.300

2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

Wymiary statywu (W/S/G)	900 x 570 x 570 mm
Ciężar	9 kg
Wymiary kosza (W/S/G)	180 x 300 x 200
Wysokość statywu z zasilaczem	1100 mm

Statyw wyposażony jest w kosz oraz haki służące do przechowywania dodatkowego wyposażenia, niezbędnego w trakcie pracy z zasilaczem.

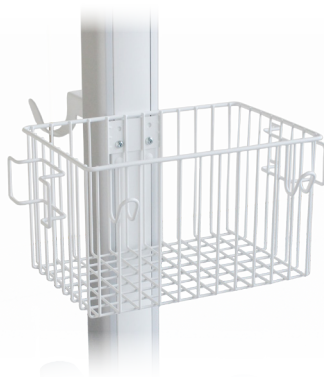

Koła jezdne zaopatrzone w gumowane bieżnie sprawiają iż statyw przemieszcza się płynnie i cicho. Zintegrowane z kołami blokady pozwalają na unieruchomienie statywu zapobiegając niekontrolowanemu przemieszczeniu. Platforma jezdna oraz kolumna statywu wykonane są z lekkich, a przy tym bardzo wytrzymałych stopów aluminium dzięki czemu całość jest stabilna przy zachowaniu niskiej wagi.



3. MONTAŻ ZASILACZA I OBSŁUGA STATYWU

Do połączenia zasilacza ze statywem służą dwie śruby **1** (będące w komplecie ze statywem), które poprzez otwory wykonane w płycie **2** statywu, wkręcić w gwintowane otwory znajdujące się w spodzie zasilacza.




UWAGA:

Podczas montażu zasilacza na statywie należy go stale przytrzymywać do momentu wkręcenia przynajmniej jednej ze śrub mocujących.

Statyw przemieszczać trzymając za uchwyt umieszczony w górnej części zasilacza.



W celu unieruchomienia statywu, wcisnąć w dół łapy znajdujące się przy kołach jezdnych (blokadę posiadają 2 z 5 kół). Zwolnienie blokad następuje po podważeniu łap w górę.

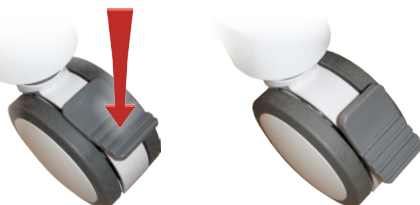

4. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Statyw czyścić miękką szmatką zwilżoną (*nie ociekającą*) w łagodnym detergencie, następnie przetrzeć na sucho. W przypadku zabrudzenia statywu czynnikami zakaźnymi jak krew, płyny ustrojowe, itp., statyw przetrzeć miękką szmatką nasączoną środkiem dezynfekującym o neutralnym pH, następnie szmatką zwilżoną w łagodnym detergencie i przetrzeć na sucho.

5. SERWIS

W sprawie serwisowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych należy kontaktować się z przedstawicielem producenta lub bezpośrednio z firmą **ChM**, na poniższy adres:

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny, Polska
TEL: +48 85 713-13-20
FAX: +48 85 713-13-19
e-mail: chm@chm.eu
www.chm.eu

**UWAGA:**

Zabrania się samodzielnych napraw oraz wymiany części. Wprowadzone zmiany będą podstawą do unieważnienia gwarancji.

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 713 13 20
fax +48 85 713 13 19
chm@chm.eu
www.chm.eu



ISO 9001
ISO 13485